

新しい”経路”の誕生、
アクセス
進化したエタニティー専用インジェクター

ETERNITY ACCESS EASE[®]

エタニティーアクセス イーズ[®] モデル：SXJ-70

エタニティー[®]X-70、エタニティー ナチュラル[®] NX-70専用インジェクター

ETERNITY **A**CCES **S**ERIES

EASY


セッティング操作が、より簡便に

ACCURACY

セッティング・リリース操作が、より正確に

SAFETY

リリース操作が、より安全に

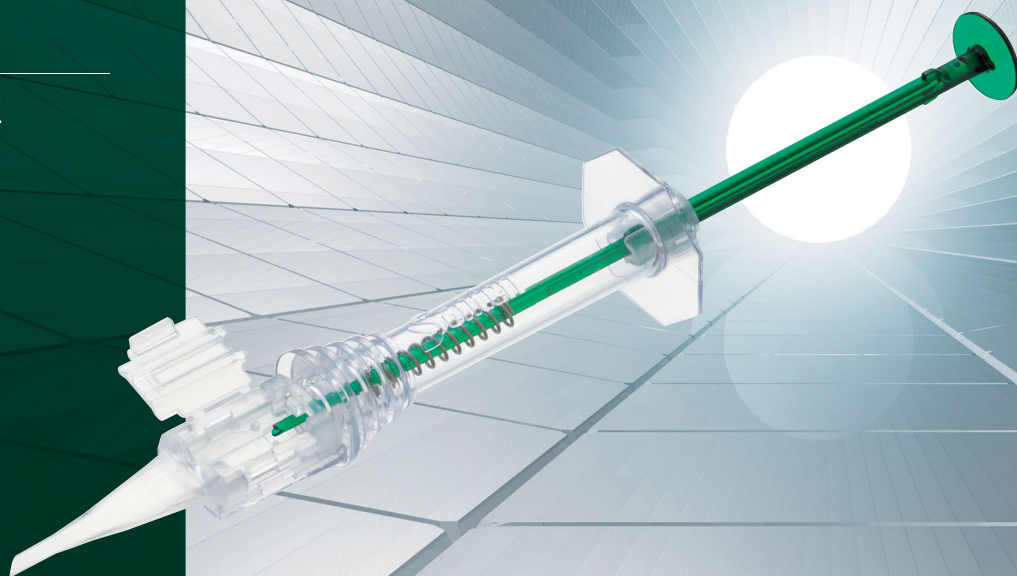

Santen

ETERNITY ACCESS EASE®


エタニティーアクセス イーズ®

エタニティー® X-70、エタニティー ナチュラル® NX-70専用インジェクター

本体(カートリッジ一体型) 単回使用眼内レンズ挿入器


モデル: SXJ-70

医療機器認証番号: 226AIBZX00021000

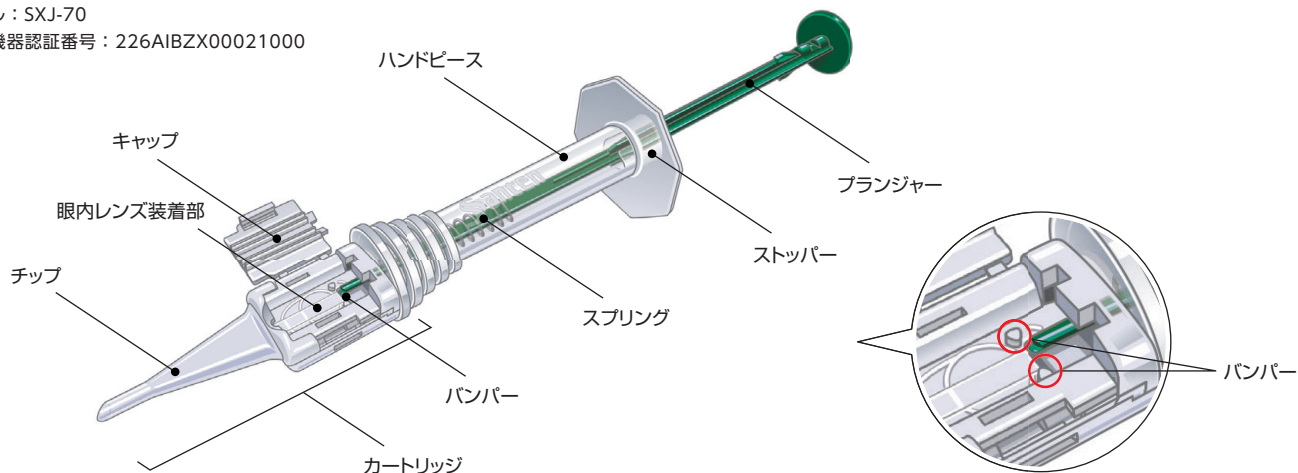


●併用眼内レンズ

エタニティー®
X-70

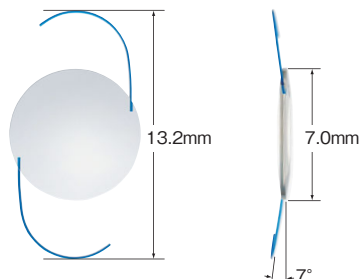

※SXJ-70は、X-70、NX-70専用のインジェクターです。

エタニティー ナチュラル®
NX-70

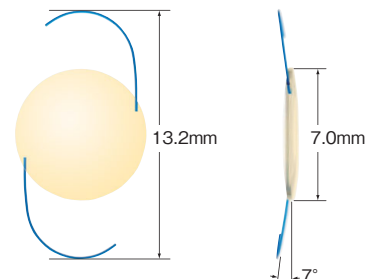

●操作方法

※詳細は、エタニティーアクセス イーズ® SXJ-70取扱説明書をご参照ください。

1



眼粘弾剤をチップならびに眼内レンズ装着部に適量を注入・塗布する。

2




眼内レンズを眼内レンズ装着部に設置する。この時、後方ループがプランジャー先端の上にあることを確認する。

3




キャップを閉じてロックさせる。

4

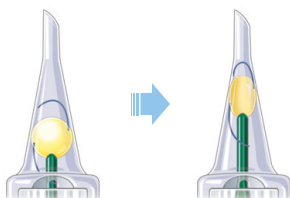


プランジャーを前方に向かってゆっくりと押し、眼内レンズをチップ内に押し進める。

5

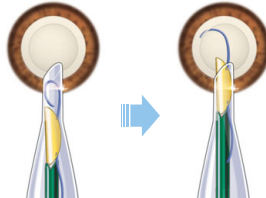

チップ先端をベベルダウンの状態にして創口から眼内に挿入し、プランジャーをゆっくりと押し。

6

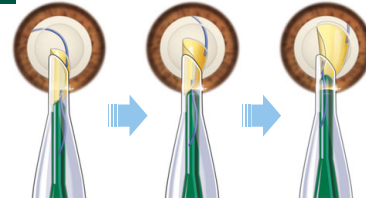

光学部がチップから出始めたら、本体を反時計回りに約90度回転させ光学部を押し出す。後方ループは眼内レンズ挿入用フックなどの適切な器具を使用し囊内に挿入する。

参天製薬株式会社

大阪市北区大深町4-20

サージカル事業部 製品企画・マーケティングチーム

2015年5月作成
S14021 1E5 TO-1E5 TO