

# W-60専用インジェクターの進化形



## ACCUJECT UNIFIT<sup>®</sup>

アキュジェクト ユニフィット<sup>®</sup>

モデル：WJ-60M II

エタニティー ナチュラル ユニ専用インジェクター

より安全に

### スライド方式のレンズ設置法を導入

カートリッジ・ルーフ採用により、支持部がカートリッジ・ウィングに挟まれるリスクを低減

より簡便に

### ロック機構の追加により、 プランジャー操作で支持部がタッキング


一定の箇所プランジャーをいったん停止させ、カートリッジ・ウィングを閉じることで支持部がタッキング

よりスムーズに

### 押圧抵抗を軽減し、操作時のスムーズ性を向上

操作性向上を目的として、プランジャー素材を変更、スプリングを廃止、フランジ位置を変更

単回使用眼内レンズ挿入器  
販売名：アキュジェクト ユニフィット  
医療機器認証番号：223AIBZX00045000

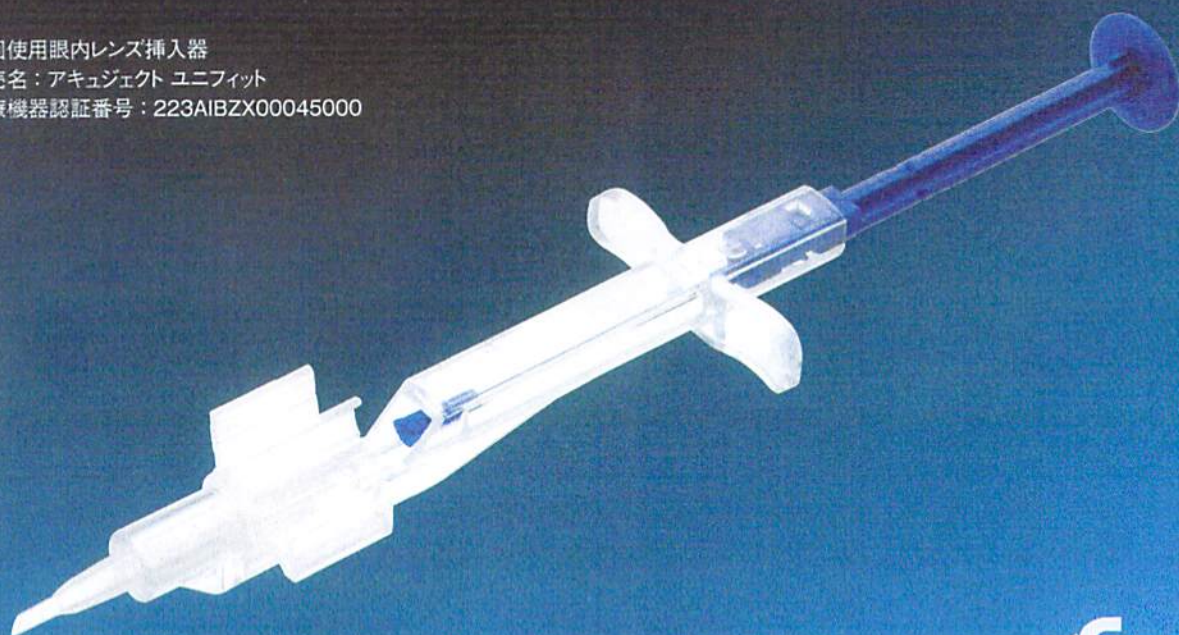

Santen

# ACCUJECT UNIFIT®


モデル：WJ-60M II

アキュジェクト ユニフィット®

本体(カートリッジ一体型) 単回使用眼内レンズ挿入器

モデル：WJ-60M II


医療機器認証番号：223AIBZX00045000

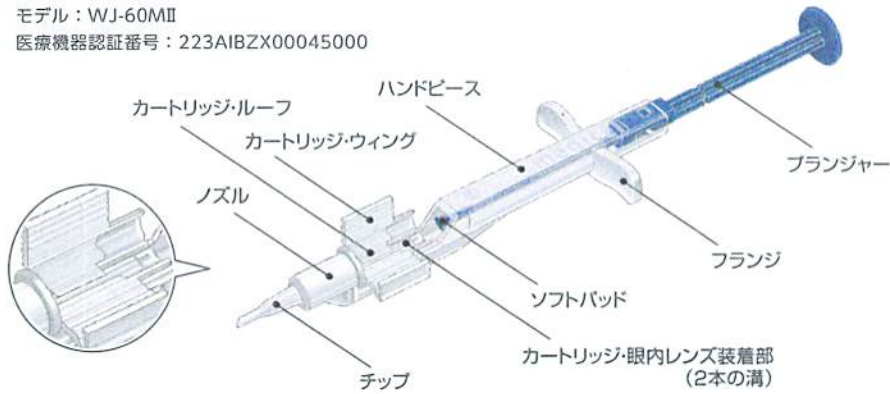

※WJ-60M IIは、W-60専用のインジェクターです。

## ●併用眼内レンズ

エタニティー ナチュラル ユニ® W-60

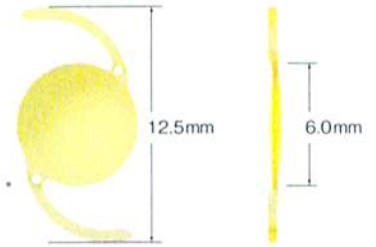

### より安全に


#### スライド方式の レンズ設置法を導入

カートリッジ・ルーフ採用により、  
支持部がカートリッジ・ウィングに挟まれるリスクを低減

WJ-60M (従来モデル)



WJ-60M II

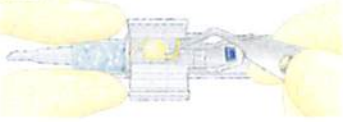

### より簡単に

#### ロック機構の追加により、ブランジャー 操作で支持部がタッキング

一定の箇所までブランジャーをいったん停止させ、  
カートリッジ・ウィングを閉じることで支持部がタッキング

WJ-60M (従来モデル)



WJ-60M II



### よりスムーズに

#### 押圧抵抗を軽減し、 操作時のスムーズ性を向上

操作性向上を目的として、ブランジャー素材を変更、  
スプリングを廃止、フランジ位置を変更

WJ-60M (従来モデル)



WJ-60M II



## ●操作方法


※詳細は、アキュジェクト ユニフィット® WJ-60M II 取扱説明書をご参照ください。

1



眼粘弾剤をノズルに注入しながらカートリッジ・眼内レンズ装着部  
(2本の溝)に沿って適量を塗布します。ノズルへの注入は  
カートリッジ・ルーフ前方から、カートリッジ・眼内レンズ装着部  
(2本の溝)への塗布はカートリッジ・ルーフ後方から行います。

2

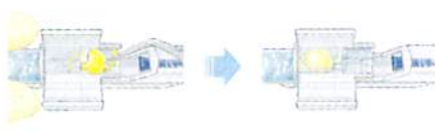


眼内レンズを後方からスライドさせてカートリッジ・眼内レンズ  
装着部(2本の溝)の上に設置します。この時、眼内レンズが  
カートリッジ・ルーフの下にあること、カートリッジ・ウィング内部  
の溝にはまっていることを確認します。

3



ブランジャーをゆっくりと押し、ソフトパッドをカートリッジ・ウィング  
に描かれているライン(ブランジャーのロックが掛かる位置)  
まで前進させます。

4

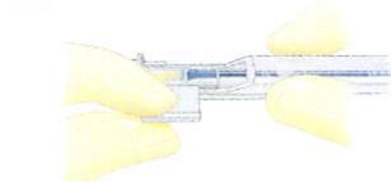

カートリッジ・ウィングを閉じてロックさせます。この時、両方の  
ルーフ(先行ルーフ、後方ルーフ)がタッキングしていることを  
確認するとともに、両方のルーフ(先行ルーフ、後方ルーフ)  
ならびにソフトパッドがカートリッジ・ウィングに挟まれていない  
ことを確認します。

5



ブランジャーを前方に向かってゆっくりと押し、眼内レンズを  
チップ内に押し進めます。

6



チップ先端をベベルダウンの状態にして創口から眼内に  
挿入し、ブランジャーをゆっくりと押し進め、眼内レンズを嚢内  
に押し出します。

参天製薬株式会社

大阪市北区大深町4-20

サージカル事業部 製品企画・マーケティングチーム