


HHV DISPO

単回使用検査用コンタクトレンズ

HHV ディスポ

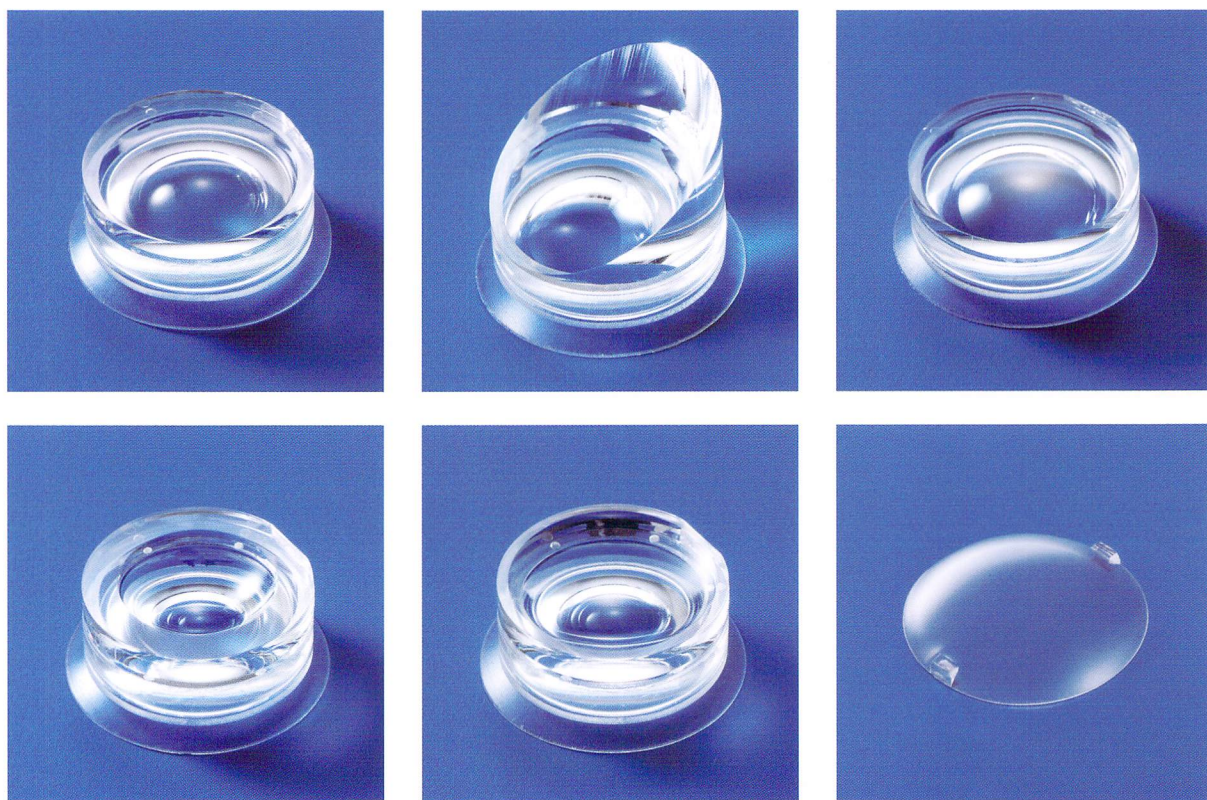

本品は、主に硝子体手術の際に硝子体及び網膜を観察するため、角膜表面にのせて使用する単回使用の検査用コンタクトレンズです。

タイプ 1d、3d、5d、6d、Wd は、レンズとシリコーンホルダーから構成され、レンズには、平凹レンズ、プリズムレンズ、メニスカスレンズ及び両凹レンズがあり、観察する部位によって使い分けます。

タイプ Zd は、レンズ表面に脱着ゲートが設けられたメニスカスレンズであり、非接触型広角観察システムを使用する場合に用いるものです。


単回使用検査用コンタクトレンズ

HHV ディスポ

本品は、主に硝子体手術の際に硝子体及び網膜を観察するため、角膜表面にのせて使用する単回使用の検査用コンタクトレンズです。

タイプ1d、3d、5d、6d、Wd

タイプ1d、3d、5d、6d、Wdは、レンズとシリコンホルダーから構成され、レンズには、平凹レンズ、プリズムレンズ、メニスカスレンズ及び両凹レンズがあり、観察する部位によって使い分けます。

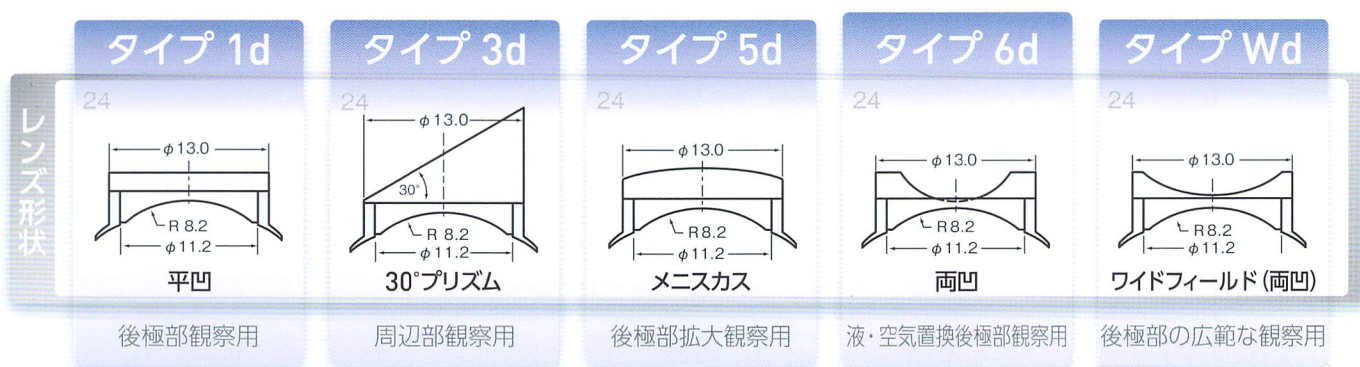


【操作方法又は使用方法等】

1. 観察部位によりレンズを選択し、滅菌バッグから無菌的に取り出して下さい。
2. 角膜中央部にヒアルロン酸ナトリウム製剤等の眼科用粘弾性物質を滴下して下さい。
3. レンズのホルダー側を角膜に密着させて、レンズを角膜中央部に装着して下さい。

【材質】 レンズ：メタクリル樹脂
シリコンホルダー：シリコンゴム

【包装】 1個×5袋／箱

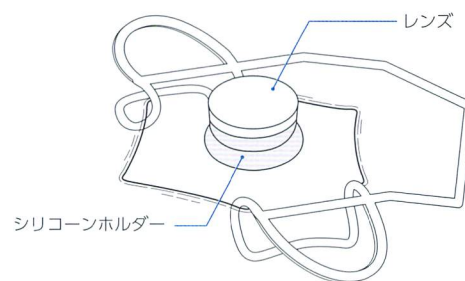

タイプZd

タイプZdは、レンズ表面に脱着ゲートが設けられたメニスカスレンズであり、非接触型広角観察システムを使用する場合に用いるものです。




【使用方法等】

1. レンズを滅菌バッグから無菌的に取り出して下さい。
2. 角膜中央部にヒアルロン酸ナトリウム製剤等の眼科用粘弾性物質を滴下して下さい。
3. 鑷子で脱着ゲートを把持し、レンズを角膜中央部に装着して下さい。
4. レンズを取り外す際は、鑷子で脱着ゲートを把持し、角膜上から取り外して下さい。

【材質】 メタクリル樹脂

【包装】 1個×5袋／箱

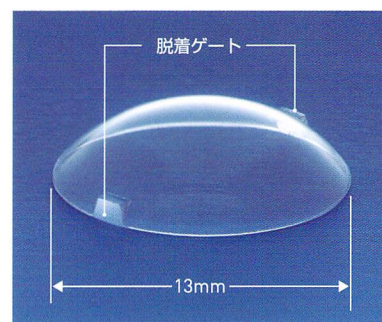

お問い合わせ窓口
HOYA株式会社 メディカル事業部
〒164-8545 東京都中野区中野4-10-2
中野セントラルパークサウス6F
TEL.03-5913-2343

販売名 : HHV ディスポ
認証番号 : 220AFBZX00216000
製造販売業者 : HOYA株式会社
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-10-1

HOYA
SURGICAL OPTICS

2016-05-31_HSOJ_HHV DISPO_DS_JP_01