

ダブルニードルテクニックをサポートする

山根氏ダブルニードルガイド

37-0078

医療届出番号 18B2X10004000216

Material / Titanium Alloy
Total Length / 109mm



Scale 1/1

● 山根式IOL強膜内固定術(フランジ法)とは:


30G肉薄針を用いてIOL支持部を引き出し、フランジ(膨大部)を作って強膜へ固定する低侵襲なIOL強膜内固定術です。

この手法に於ける針の刺入位置と角度は非常に重要で、IOL固定術への影響が大きい
ため本製品で常に一定角度での針の刺入をサポートすることで、術後のIOL偏心傾斜の
予防にお役立ていただけます。



山根式フランジ法動画

先行支持部

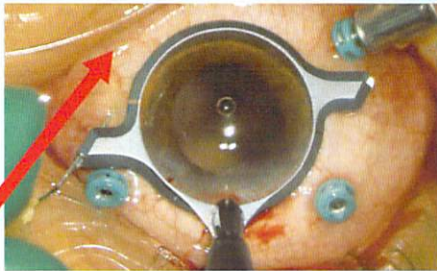

山根氏ダブルニードルガイド使用方法

1. ガイドの内縁を角膜輪部に合わせ、2か所の針刺入部位をマーキングする。
2. 顕微鏡の光を固視させ、ガイドの反射光を参考に水平を保つ。
3. ガイドに沿って30G肉薄針を進め、マーキング部に針が刺入されることを確認する。
4. 眼圧を上げ、針を眼内へ刺入する。

後方



5. 対側に2本目の針を刺入後、針を溝から外し針の先端が眼内にあることを確認する。

注意: 角膜径が小さい場合は1本目の針をガイドから外し、
対側の角膜輪部にガイドを合わせ直してから2本目
の針を刺入する。

外す



器具の水平を見る為に、天面にツヤ出し処理を
しております。これにより、光の反射具合を見て
水平である事を確認できます。

※Not all products are available in all markets. ※製品によって販売されていない地域があります。

※Designs and specification subject to change without notice ※製品仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

●お問い合わせ先

株式会社 シヤルマン メディカル事業部 カスタマーサービス

〒916-8555 福井県鯖江市川去町6-1

TEL.0120-180807 FAX.0120-030887 www.charmant-medical.com

CHARMANT