



創業100周年記念

SALE


2024/06/03-2024/07/19

SUPER SALE

数量限定 特別価格

Quick Service

PICK UP

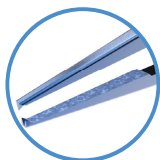

段付

view

縫合鑷子 前方突出型 (80 度) 段付

DS-003 全長 90mm / 鉤幅 0.12mm ¥43,400 (通常 ¥62,000)

材 Ti 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001660 入 1

使い易さを徹底的に追求した定番スタイルのチタニウムモデル。


長年の経験と研究により先端の爪の角度を改良。前方突出の「つまみ易さ」と直角型の「がっちりした把持力」を両立しました。先端は、鉤のサイズ、角度にこだわり、タングステンカーバイド加工を施しております。また、操作感を追求し、滑り止めハンドル機構の採用や、吸いつくような把持感を生み出す最適なテンションを採用しております。

SUPER SALE

数量限定 特別価格

Quick Service

Best Seller

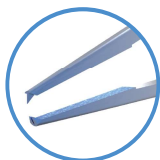

段付

view

縫合鑷子 前方突出型有鉤 段付

MB-012 全長 88mm / 鉤幅 0.12mm ¥43,400 (通常 ¥62,000)

材 Ti 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001258 入 1


ソフトなテンションとタングステンの把持力がコラボ。

ソフトなテンションと、微細な鉤が組織に対するダメージを軽減しつつ、タングステンによるしっかりとした把持を可能とした、絶妙な使い勝手が魅力です。

SUPER SALE

数量限定 特別価格

Quick Service

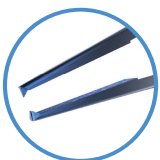

段付

view

縫合鑷子 直角型有鉤 段付

MB-011 全長 88mm / 鉤幅 0.12mm ¥42,000 (通常 ¥60,000)

MB-011F 全長 88mm / 鉤幅 0.10mm ¥43,400 (通常 ¥62,000)


材 Ti 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001258 入 1

ソフトなテンションとタングステンの把持力がコラボ。

ソフトなテンションと、微細な鉤が組織に対するダメージを軽減しつつ、タングステンによるしっかりとした把持を可能とした、絶妙な使い勝手が魅力です。

SUPER SALE

数量限定 特別価格

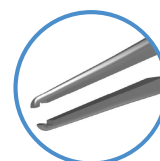

段付

マイクロ角膜・縫合鑷子 P-H 型 マイクロファイブ

M-3RF 全長 85mm 鉤幅 0.3mm ¥27,300 (通常 ¥39,000)

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048000019 入 1


組織への優しさと、ファインな把持を両立。

先端がファインな P-H 型鑷子。P-H 型の特性である組織へのダメージを抑えつつ、微細な先端でファインな把持を実現します。また、段付き設計のため、安定した先端のかみ合わせ、把持力を発揮すると同時に、結紮もこなす汎用性も魅力です。

SUPER SALE

数量限定 特別価格

Quick Service

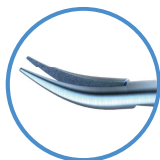

ボーブル氏睫毛鑷子 チタニウム

DS-325TC 全長 110mm / 先端 0.5mm ￥46,200 (通常 ￥66,000)

材 Ti 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048000952 入 1

大人気ボーブル氏睫毛鑷子のハイエンドモデル。


圧倒的な人気を誇る S-325 ボーブル氏睫毛鑷子のチタニウムモデル。テンポラルアプローチスタイルの使い勝手は勿論、先端にはイナミ独自のタングステンカーバイド加工が施しており、よりノンスリップな睫毛抜去を実現することに成功しました。患者さまの負担もより軽減され、ハイエンドモデルとしての性能を発揮いたします。

SUPER SALE

数量限定 特別価格

Quick Service

Best Seller

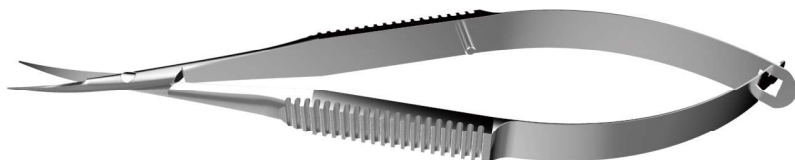

スプリングハンドル式剪刀 反

S-511C 鋭 全長 105mm / 刃先 8mm ￥32,200 (通常 ￥46,000)

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35327001 屈 13B1X00048001319 入 1

ベストセラーのユーティリティーマイクロ剪刀。

汎用性の高さを使い勝手の良さで圧倒的な人気を誇るマイクロ剪刀の代名詞的商品。組織の切開から、抜糸、ドレープや給水スポンジ、ガーゼなどの消耗品の切開まで、マイクロサージャリーにおいてなくてはならない存在です。

SUPER SALE

数量限定 特別価格

PICK UP



デリケート型持針器 曲 12mm

MB-029 止無 全長 124mm / 先端 12mm ￥51,800 (通常 ￥74,000)

材 Ti 薬 クラス I JMDN 12726010 屈 13B1X00048001136 入 1

先端タングステンカーバイド加工によるノンスリップ縫合。

先端に独自のタングステンカーバイド加工を施しており、縫合糸を滑らずに把持することが可能です。またスリムチップのため、顕微鏡下での視認性や 8-0 ~ 11-0 の細い針、糸の把持、操作性に優れております。チタニウムによる軽量化も特長です。

SUPER SALE

数量限定 特別価格

Quick Service

Best Seller



view



カストロヴィーホー氏持針器 曲

S-730 止付 全長 140mm / 先端 10mm ￥36,400 (通常 ￥52,000)

材 SUS 薬 クラス I JMDN 12726010 屈 13B1X00048001150 入 1

太めの針、糸の操作に便利な大型持針器。

外眼部手術やバックリングなど、4-0 ~ 7-0 などの太めの針や糸を使用する際にも便利な大型持針器のスタンダードモデル。先端のみノングレタ加工を施しております。

SUPER SALE

数量限定 特別価格

Best Seller



view

分割君（徳田式核分割フック）

M-136 全長 104mm / 先端 0.6×1.0mm **¥25,200** (通常¥36,000)

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32767000 屈 13B1X00048001530 入 1



圧倒的ユーザーを誇る核分割フックのベストセラー。

発売以来多くのユーザーを誇る核分割フックのベストセラー。溝掘り分割法において、抜群の操作性を誇り、素早さ・確実性・安全性の三拍子揃った核分割フックの代名詞の商品です。

SUPER SALE

数量限定 特別価格

PICK UP



view

中京式スパーテル

M-1112 全長 110mm / 先端 0.5×0.9mm **¥25,200** (通常¥36,000)

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32767000 屈 13B1X00048001485 入 1



MOVIE



分割手法を問わず使用できるオールマイティーな 1 本。

溝掘り分割法、フェイコチョップ法、どちらの方法にも対応できるようにデザインされており、やわらかい核から硬い核まですべての症例に対応できます。先端は草刈鎌形状になっております。刃の部分は若干屈曲しており、水晶体溝の側面に刃が面として接触しやすく、分割しやすくなっています。水晶体嚢に直接接触しない刃の内側部分は研磨されており、硬い核でも切開が可能で、フェイコチョップ法が容易にできます。研磨された内側以外は鈍な形状になっており、水晶体嚢を押さえることも可能です。核の回転や分割では、鉛筆を指の中で転がすようにスパーテルを回転させること、フェイコチョップ法では、刃の切れる方向に鉋を振り下ろすように切開し、その後スパーテルを回転させ分割することが操作のポイントです。

SUPER SALE

数量限定 特別価格

Best Seller

スムーズな薬液注入が可能な 3 ポートタイプ。

先端と側面二ヶ所の計三ヶ所に開口部があるため、テノン嚢下に針を挿入した際、先端開口部が組織にふさがれた場合でも薬液を注入することが可能です。



view



近江氏テノン嚢下注入針 3 ポート 24G

M-1508 全長 37mm / シャフト 21mm / 径 24G **¥8,400** (通常¥12,000)


材 SUS 薬 クラス I JMDN 34899031 屈 13B1X00048001537 入 1

SUPER SALE

数量限定 特別価格

使いやすさと安全性を追求した定番タイプ。

使いやすさと安全性、そしてコストパフォーマンスを追求しました。45°の扁平×23G の設計で、効率良く、また水晶体線維に対してもより安全に作業が行えます。

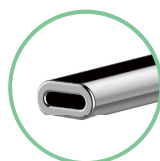

ハイドロカニューラ 23G

M-1524 全長 40mm / シャフト 22mm / 先端 0.7mm / 径 23G (特殊パイプ) **¥6,300** (通常¥9,000)

材 SUS 薬 クラス I JMDN 34899031 屈 13B1X00048001833 入 1


SUPER SALE

数量限定 特別価格

Best Seller



view

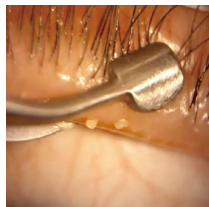

有田式マイボーム腺圧出鑷子

M-2073 全長 100mm / 先端 3.2mm ￥28,000 (通常 ￥40,000)

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048002378 入 1

優しく HOLD、しっかり圧出、究極の Painless 設計。

ご考案者 有田 玲子 先生

(埼玉県 さいたま市 伊藤医院) コメント

「マイボーム腺開口部のタビオカサイン、Plugging を解除することは、マイボーム腺機能不全 (Meibomian Gland Dysfunction, MGD) 治療の第一歩です。毎日 MGD の患者さんばかりを集中的に診療している私が、患者さんの痛みを最大限に軽減するための先端部設計にこだわり、日本人の眼瞼厚にフィットし、力を入れなくても把持するだけで閉塞解除とマイバム圧出ができるようなハンドル設計を施しました。ぜひ、一度、手に取ってお試しください (＾O＾) /」

SUPER SALE


数量限定 特別価格

涙道への挿入長を確認できる乳幼児用
目安付きブジー型洗浄針。

ご考案者 五嶋 摩理 先生

(東京女子医科大学東医療センター 眼科) コメント

「針先が鈍で涙道粘膜を傷つけにくく、側面に通水孔があり、加圧通水しながらの穿破が可能です。先端より 10mm から 15mm の間が無光沢になっており、挿入長の目安になります。従来の乳児用ブジー型洗浄針に比べ短いため、針先を進めながらの通水が行いやすく、腰が強いので折れにくく、深く挿入し過ぎる危険性が少なくなります。また、より細いブジーに比べて仮道をきかすにいく上、涙点拡張もほとんど必要ありません。」

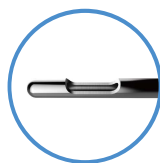

五嶋式ブジー型涙管洗浄針

M-2058-55 全長 71mm / シャフト 55mm / 径 21G A 10mm / B 5mm / C 40mm ￥7,000 (通常 ￥10,000)

材 SUS 薬 クラス I JMDN 70459000 屈 13B1X00048000554 入 1



SUPER SALE

数量限定 特別価格



view



前田式翼状片スパーテル

M-1104 全長 110mm / 先端 1.5×0.1mm ￥18,200 (通常 ￥26,000)

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32754001 屈 13B1X00048000204 入 1



MOVIE



MOVIE

翼状片を安全に容易に剥離する高機能スパーテル。

翼状片周囲の角膜上皮を除去後、体部に切開を入れ、翼状片下に本製品を挿入します。大きな鑷子でむしるように引き上げながら、癒着の強い頭部に向かって横の動きで鈍的に剥離する事が可能です。スパーテルの独特の形状は、翼状片の剥離をスムーズかつ安全に行えるよう、先端をやや鈍先に、そして側面は窪みをつけたエッジとなっており、増殖組織をひっかけるようスムーズに切断することが可能です。

SUPER SALE

数量限定 特別価格



小切開硝子体手術対応の課題解決型 360° ローラー圧迫器。

ご考案者 服部 隆幸 先生（駿河台日本大学病院 眼科）コメント

「硝子体手術は 25G・23G システムの導入で、より一層の低侵襲化が進んでいます。しかしながら、実際の手技は 20G システムと何ら変わることがなく、特に眼球圧迫下での周辺硝子体切除は、wide viewing システムの有無にかかわらず重要な手技です。眼球圧迫に用いる圧迫器具に共通する欠点として、『ピットとよばれる医源性結膜裂傷を生じる』『術野を移動する際に、スムーズに移動できない』などが挙げられます。このような問題点を解決するために、先端部に 360 度回転可能な滑車を取り付け、その滑車部分を結膜や強膜上で転がしながら、眼球の圧迫を行うことが可能な器具を開発しました。

特に 25G・23G システムでの硝子体手術においては、結膜を切開せず、直接結膜上から眼球の圧迫を行うため、ローラー効果により、結膜へのピットを回避する点において大変有効です。

また、圧迫したまま術野の移動が可能であり、周辺硝子体の処理時間の短縮に貢献するだけでなく、移動時の眼圧変動を最小限にすることが可能になることから、硝子体の創口への陥頓に起因する合併症を防止することに繋がります。」

服部式滑車型眼球圧迫器

M-2061 全長 109mm / 滑車 3.0mmφ / 6.5mm ￥32,200 (通常 ￥46,000)

M-2061S 全長 109mm / 滑車 2.5mmφ / 6.5mm ￥32,200 (通常 ￥46,000)

M-2061X 全長 109mm / 滑車 1.5mmφ / 6.5mm ￥32,200 (通常 ￥46,000)

材 SUS 薬 クラス I JMDN 33804000 屈 13B1X00048000555 入 1

SUPER SALE

数量限定 特別価格



PICK UP

術野の展開と液体の除去を同時に 1 本で行える優れモノ。

裂孔原性網膜剥離に対する強膜バックリング術において、良好な術野の視認性を得るために、術野の展開、術野に貯留する液体の除去などを適切に行なう必要があります。この術野の展開と液体の除去（吸引）を別々の作業として従来は行なわれていたが、本器具は、術野の展開に用いるスパーテルに吸引機能を付加し、術野の展開と液体の吸引を片手で同時に行なえることを目的として開発されました。

把持部にある調節ボートを指で開閉操作することにより、吸引機能を調節・停止できるように設計されています。調節ボートから指を離してフルオープンにすれば、瞬時に吸引を停止させることが可能となります。

アスピレーティングスパーテル

M-2057 全長 139mm ￥57,400 (通常 ￥82,000)

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32754001 屈 13B1X00048000055 入 1

SUPER SALE

数量限定 特別価格

開瞼力と広い術野の確保が可能なプレートタイプ。

スライディング方式で開閉し、横のネジで任意に開瞼幅を調節できます。開瞼力が強く術野を広く確保できるのが特長です。斜視手術や強膜内陷術などの眼球深部の手術には特に有用と評価されております。


開瞼部は、プレートタイプで、睫毛や弛緩した皮膚などをしっかりと巻きこむことが可能です。眼瞼縁と手術野の接触がプレートで遮蔽されるため、感染予防効果も期待できます。外眼部の外来小手術等にお勧めです。

バンガーター氏開瞼器 大

S-813R 右眼用 開瞼部 14mm ￥16,800 (通常 ￥24,000)

S-813L 左眼用 開瞼部 14mm ￥16,800 (通常 ￥24,000)

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35349001 屈 13B1X00048001682 入 1

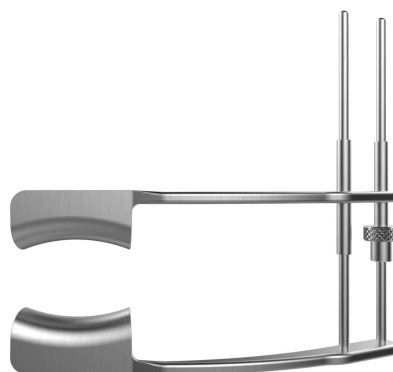

Best Seller

製造販売業許可番号 13B1X00048

Inami 株式会社 イナミ

Website: <http://www.inami.co.jp> Email: corpinfo@inami.co.jp

ご注文に際しては、お客様ご指定の販売店様へご連絡頂けますようお願いいたします。

※ 記載されている価格は税抜表記となっております。
 ※ 製品の仕様・デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。
 ※ 製品サイズには公差があるため、実際の製品は本カタログ記載サイズと若干前後する場合があります。
 ※ 本カタログ中の製品の色は印刷物であるため実際のものと異なる場合があります。
 ※ 商品の発送は、ご注文をいただいた順番により手配させていただきます。1日でも早く発送させていただくよう準備をしておりますが、ご注文状況によっては、若干のお時間を頂戴する場合がございます。何卒ご了承下さいませ。

v.1.0