

不織布3層サージカルマスク<耳掛け> **小さめ** HM-71004 JIS T 9001 医療用マスク クラスIII



Point
1

樹脂素材の
ノーズフィットピースにより
鼻のラインに
ぴったり合わせられます。

Point
2

三層構造で
空気中の微小粒子の侵入を防ぎます。
※フィルタ部の性能です。

Point
3

マスク下部の **AZEARTH** の
アルファベットが
正しく読める面が外側です。

3段折り
立体設計

マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。

使用方法



マスク上部のノーズフィットピースを鼻の形に合わせて、ヒモを両耳に掛けます。

※ノーズフィットピースを折り曲げる際、端部の飛び出しにご注意ください。



顔とマスクの間に隙間ができないように、ブリーツを上下に伸ばし、位置を調節します。

※マスクを外す際は、マスクの表面に触れないように外し、廃棄してください。

使用上の注意等

- 細かい粉じんや油などは浸透しますのでご注意ください。また、化学物質や有害物質への防護性能はありませんので、それらを取扱う作業には使用しないでください。
 - 万一、本製品の使用でかゆみなどの症状が発生した場合や、臭いで気分が悪くなった場合は、使用を中止してください。
 - ノーズフィットピースは樹脂製ですが、取り扱いにご注意ください。
 - 乳幼児の手の届かない所に保管してください。
 - 可燃性のため、高熱・火気にご注意ください。
 - 本製品は1回使い切りタイプです。洗濯はしないでください。
- ※製品・パッケージは予告なく仕様等が変更されることがあります。

HM-71004 不織布3層サージカルマスク<耳掛け> **小さめ**

日本産業規格 JIS T 9001						
医療用マスク クラス III 規格適合番号 M32512006						
適合番号発行元: JHPIA						
試験項目	PFE	BFE	VFE	可燃性	血液バリア	安全衛生
規格値	≥98%	≥98%	≥98%	(区分1)	21.3 kPa	・通気性
適合判定	○	○	○	○	○	○

PFE: 微小粒子捕集効率、BFE: バクテリア飛まつ捕集効率、VFE: ウイルス飛まつ捕集効率

- 仕様** 3段折り立体設計・3mm 幅耳ヒモ・使い切りタイプ
サイズ 小さめサイズ(約 14.5cm x 約 9.5cm)
カラー 白
入数 50枚 / 箱 ※販売単位: 1ケース(40箱入)
素材 本体: ポリプロピレン
 ノーズフィットピース: ポリエチレン
 耳ヒモ部: ポリエステル・ポリウレタン
生産国 中国



アゼアス株式会社

<https://www.azearth.co.jp>

ヘルスケア製品営業部

本社 〒111-8623 東京都台東区蔵前 4-13-7
 TEL: 03-3861-3537 FAX: 03-3861-2485
 大阪事業所 〒542-0081 大阪市中央区南船場 4-7-6 心齋橋中央ビル 2階
 TEL: 06-6244-1222 FAX: 06-6244-1737 Mail: info6@azearth.co.jp